

Наше качество - Ваш успех !



**Дезинфекция,
стерилизация,
содержание
инструментов NTI**

Для стоматологов


Цель

- 1) Удовлетворение требований потребителей
- 2) Выполнение требований гигиены
- 3) Выполнение требований безопасности
- 4) Экономия затрат на ремонт



Контроль и отбор инструментов

- 1) Проверьте сохранность хвостовика**
- 2) Проверьте алмазное покрытие или режущие грани на наличие повреждений**

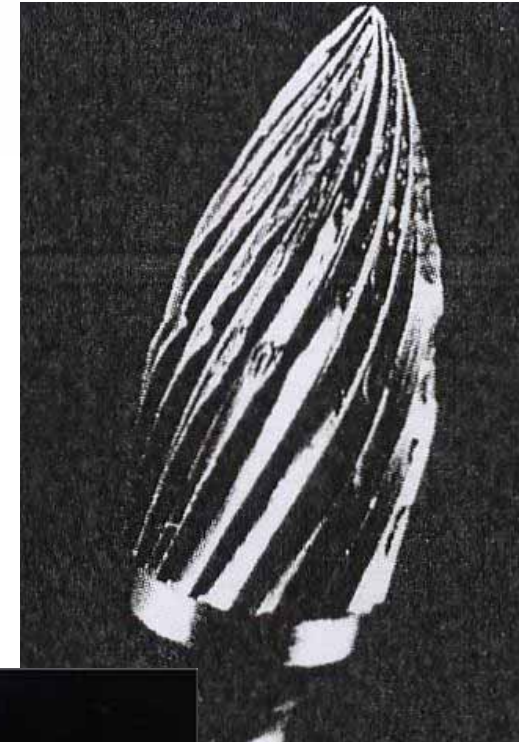

Контроль и отбор инструментов

- Используйте лупу для визуального контроля


3) Проверьте центричность „катанием“



Очистка инструментов

**4) Очищайте полиры
Правильным камнем**

5) Промывайте инструменты водой

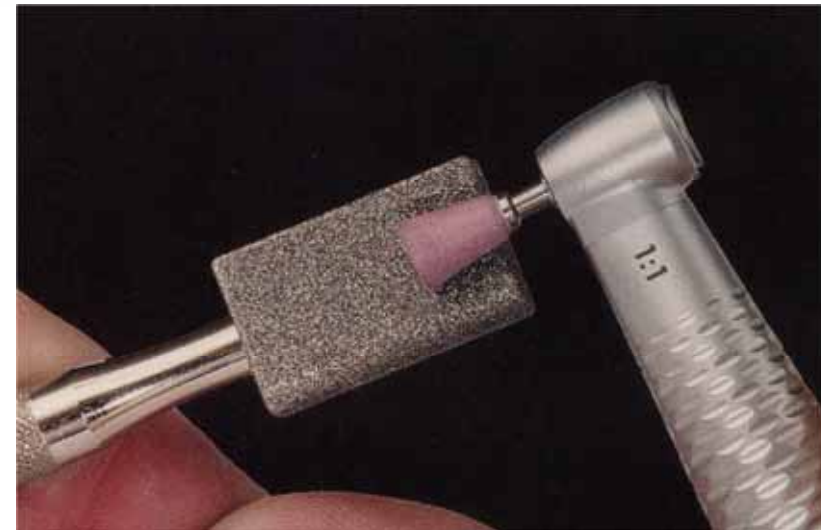

Очистка инструментов

**6) Очищайте алмазные боры
Правильным камнем**

**7) Очищайте твердосплавные инструменты
металлической щеткой**



Проверка турбины

- 8) Проверьте надежность фиксации в зажимном патроне
- Проверьте надежность фиксации вручную или специальным приспособлением



Проверка турбины

9) Проверьте зажим турбины

- Инструмент должен вращаться без биения
- Калибровочные хвостовики должны вращаться без биения



Проверка турбины

**10) Проверьте расход
охлаждающей жидкости**

- **Минимум 50 мл / мин**



Дезинфекция


11) Используйте только сертифицированные растворы

- не пользоваться спиртом для полиров
- не использовать перекись водорода H_2O_2



Дезинфекция

**12) Выдерживайте концентрацию раствора
и время дезинфекции**

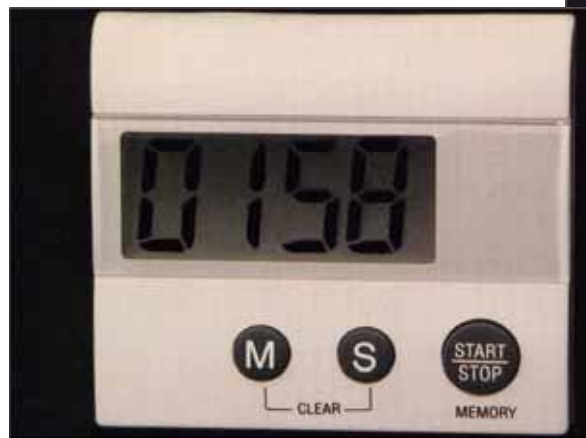

Дезинфекция


- 13) Предотвращайте изменение концентрации дезинфицирующего раствора**
- 14) Обновляйте раствор регулярно**
- 15) Пользуйтесь чистым контейнером**
- 16) Не перегревайте раствор (не более 45°C)**



Дезинфекция

17) Не смешивайте инструменты из различных материалов

- **стальные и алмазные инструменты**
- **стальные и твердосплавные инструменты**
- **можно смешивать алмазные и твердосплавные инструменты**

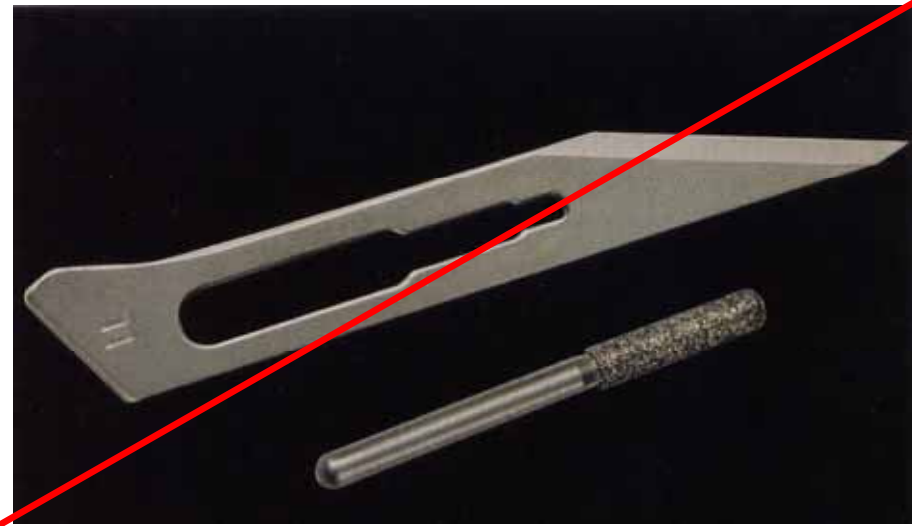

Стерилизация

**18) После дезинфекции необходимо
очистить и высушить инструменты**

19) Удалите инструменты с коррозией

20) Температура от 135°C до 180°C

- **для полиров 135°**

**21) Используйте только
дистиллированную воду**



22) Не забывайте проверять автоклав



Стерилизация

23) Ошибки при стерилизации

- **Почернение твердосплавных инструментов из-за загрязнения воды в автоклаве**

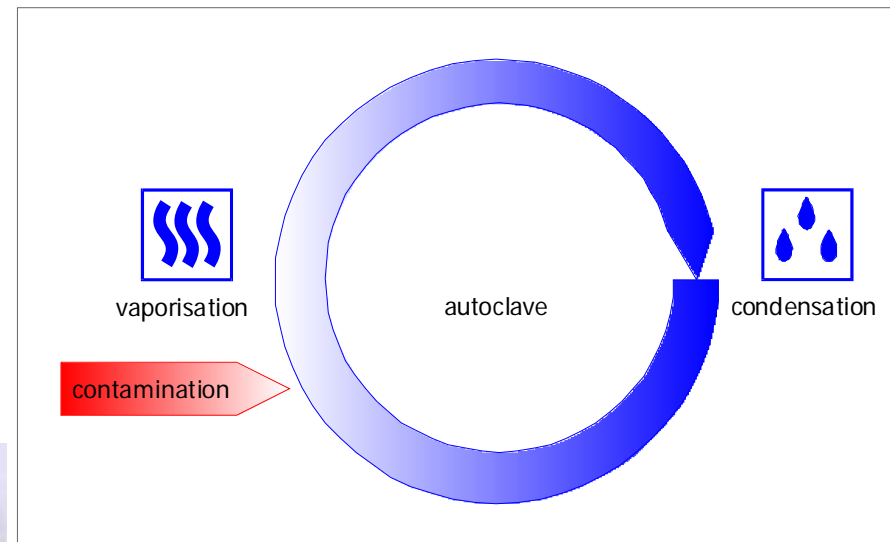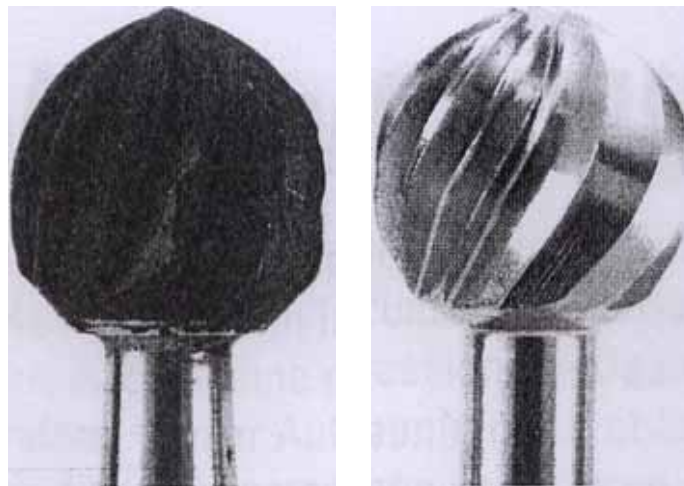

Наше качество - Ваш успех !



Copyright by NTI